
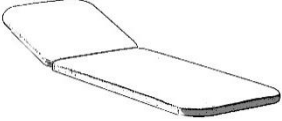


Preporuke za čišćenje Novak M preglednih stolova, terapijskih stolova i masažnih stolova S

| | MATERIJALI | ČIŠĆENJE | DEZINFEKCIJA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCIJA  | <p>Čelik obložen prahom, kromirane čelične cijevi, nehrđajući čelik</p> | <p>Preporučuje se redovito čišćenje. Upotrebljavajte mekanu krpu od mikrovlakana i mješavinu vode i sapuna. Obrišite suhom krpom. Upotrebljavajte sredstva za čišćenje bez abrazivnih čestica!</p> | <p>Za dezinfekciju slijedite iste upute kao i za dezinfekciju ojašćenja.</p> |
| | <p>Plastični pokrov</p> | <p>Prašinu i suhu prljavštinu treba ukloniti mekanom, vlažnom krpom.</p> <p>Upotrebljavajte tradicionalna neabrazivna sredstva za čišćenje u kućanstvu. Nakon toga dobro operite i očistite suhom krpom.</p> <p>Ne upotrebljavajte aceton, kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za čišćenje koja pripadaju kemijskoj skupini ketona, estera i aromatskih otapala.</p> | |
| OJASTUČENJE  | <p>Presvlaka: imitacija kože</p> | <p>Preporučuje se redovito čišćenje.</p> <p>Upotrijebite toplu vodu i krpu od mikrovlakana ili spužvu.</p> <p>U slučaju mrlja upotrebljavajte mješavinu sapuna i tople vode. Uklonite ostatke sapuna vlažnom krpom, obrišite suhom krpom i pustite da se potpuno osuši.</p> <p>Mrlje od krvi potrebno je odmah ukloniti hladnom vodom.</p> <p>Ostatke ulja za masažu i losiona treba odmah ukloniti mješavinom vode i sapuna.</p> <p>Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, aceton ili kiseline. Za održavanje ne upotrebljavajte sredstva za kožu koja sadrže ulje ili mast.</p> | <p>Uvijek očistite i osušite ojašćenje prije dezinfekcije!</p> <p>Popis preporučenih sredstava za dezinfekciju možete pronaći u prilogu.</p> <p>Obavezno slijedite upute na pakiranju.</p> <p>Rabite isključivo jedno dezinfekcijsko sredstvo za vrijeme čišćenja!</p> |

Preporuke za čišćenje Novak M preglednih stolova, terapijskih stolova i masažnih stolova S

| Glavna skupina aktivnih tvari | Sredstvo za dezinfekciju |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvarterni amonijevi spojevi i amini | Cleanisept AF wipes Incidin Extra Incidin Pro Kohrosolin FF Lysoformin Plus Microbac forte Mikrozid universal wipes Mikrozid sensitive wipes Mikrozid AF wipes Terralin protect |
| Peroksidni spojevi | Descogen Dismozon Perform |
| Formaldehid i/ili drugi derivati aldehida | Incidin Plus Incidin Kohrsolin Optisept |
| Alkohol | Bacillol AF Bacillol Plus Bacillol 30 foam Bacillol 30 tissues Incidin liquid Meliseptol foam fresh Meliseptol foam pure |

Odricanje odgovornosti

Obavezno slijedite upute za upotrebu svakog dezinficijensa. Dugotrajna upotreba ne može isključiti mogućnost propadanja materijala. Novak M ne prihvaća nikakvu odgovornost u pogledu dezinfekcijskog učinka gore navedenih sredstava.

Komenda, travanj 2023.