
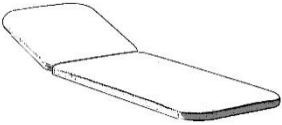


Consigli per la pulizia dei lettini terapeutici, da visita e da massaggio S di Novak M

	MATERIALI	PULIZIA	DISINFEZIONE
STRUTTURA 	<p>Acciaio verniciato a polvere, acciaio cromato, acciaio inossidabile</p>	<p>Si consiglia una pulizia regolare. Utilizzare un panno morbido in microfibra e una miscela di acqua e sapone. Asciugare. Utilizzare detergenti non abrasivi!</p>	<p>Per la disinfezione, seguire le stesse istruzioni valide per l'imbottitura.</p>
	<p>Copertura in plastica</p>	<p>La polvere e lo sporco secco devono essere rimossi con un panno morbido e umido.</p> <p>Utilizzare i tradizionali detergenti per la casa non abrasivi. Lavare bene e pulire con un panno asciutto.</p> <p>Non utilizzare acetone, detergenti chimici, solventi e detergenti appartenenti ai gruppi chimici dei chetoni, degli esteri e dei solventi aromatici.</p>	
IMBOTTITURA 	<p>Imbottitura: finta pelle</p>	<p>Si consiglia una pulizia regolare.</p> <p>Utilizzare acqua calda e un panno in microfibra o una spugna.</p> <p>In caso di macchie, utilizzare una miscela di sapone e acqua calda. Rimuovere i residui di sapone con un panno umido, passare un panno asciutto e lasciare asciugare completamente.</p> <p>Le macchie di sangue devono essere rimosse immediatamente con acqua fredda.</p> <p>I residui di olio per massaggi e lozioni devono essere rimossi immediatamente con una miscela di acqua e sapone.</p> <p>Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi, acetone o acidi! Per la manutenzione non utilizzare sostanze per pelle contenenti olio o grasso.</p>	<p>Pulire e asciugare sempre l'imbottitura prima della disinfezione!</p> <p>In allegato è disponibile un elenco dei disinfettanti consigliati.</p> <p>Seguire sempre le istruzioni riportate sulla confezione.</p> <p>Usare un solo disinfettante alla volta!</p>

Consigli per la pulizia dei lettini terapeutici, da visita e da massaggio S di Novak M

Gruppo di principi attivi principali	Disinfettante
Composti di ammonio quaternario e ammine	Cleanisept AF wipes Incidin Extra Incidin Pro Kohrosolin FF Lisoformina Plus Microbac forte Mikrozid universal wipes Mikrozid sensitive wipes Mikrozid AF wipes Terralin protect
Perossidi	Descogen Dismozon Perform
Derivati di formaldeide e/o altre aldeidi	Incidin Plus Incidin Kohrsolin Optisept
Alcol	Bacillol AF Bacillol Plus Bacillol 30 foam Bacillol 30 tissues Incidin liquid Meliseptol foam fresh Meliseptol foam pure

Esclusione di responsabilità

Seguire sempre le istruzioni per l'uso di ciascun disinfettante. L'uso a lungo termine non può escludere la possibilità di un deterioramento del materiale. Novak M non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda l'effetto disinfettante dei suddetti agenti.

Komenda, Aprile 2023