
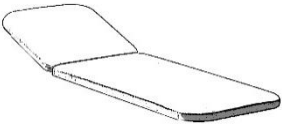


Reinigingsadvies voor Novak M onderzoeks-, therapie- en massagetafels S

	MATERIALEN	REINIGING	DESINFECTIE
CONSTRUCTIE 	Staal met poedercoating, verchromd staal, roestvrij staal	Regelmatig reinigen wordt aanbevolen. Gebruik een zachte microvezeldoek en een mengsel van water en zeep. Wrijf droog. Gebruik geen schuurmiddelen!	Volg voor desinfectie dezelfde instructies als voor de vulling.
	Plastic hoes	Stof en droog vuil moeten worden verwijderd met een zachte, vochtige doek. Gebruik traditionele huishoudelijke reinigingsmiddelen die niet schuren. Daarna goed wassen en schoonmaken met een droge doek. Gebruik geen aceton, chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen die behoren tot de chemische groepen ketonen, esters en aromatische oplosmiddelen.	
VULLING 	Bekleding: kunstleer	Regelmatig reinigen wordt aanbevolen. Gebruik warm water en een microvezeldoek of spons. Gebruik bij vlekken een mengsel van zeep en warm water. Verwijder zeepresten met een vochtige doek, veeg af met een droge doek en laat volledig drogen. Bloedvlekken moeten onmiddellijk worden verwijderd met koud water. Massageolie en lotionresten moeten onmiddellijk worden verwijderd met een mengsel van water en zeep. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, aceton of zuren! Gebruik voor het onderhoud van het leer geen olie- of vethoudende stoffen.	Reinig en droog de vulling altijd voor het desinfecteren! In de bijlage vindt u een lijst met de aanbevolen ontsmettingsmiddelen. Volg altijd de instructies op de verpakking. Gebruik slechts één ontsmettingsmiddel per keer!

Reinigingsadvies voor Novak M onderzoeks-, therapie- en massagetafels S

Belangrijkste actieve ingrediënten	Ontsmettingsmiddel
Quaternaire ammoniumverbindingen en aminen	Cleanisept AF wipes Incidin Extra Incidin Pro Kohrosolin FF Lysoformin Plus Microbac forte Mikrozid universal wipes Mikrozid sensitive wipes Mikrozid AF wipes Terralin protect
Peroxide-verbindingen	Descogen Dismozon Perform
Formaldehyde en/of andere aldehyden resp. derivaten	Incidin Plus Incidin Kohrsolin Optisept
Alcohol	Bacillol AF Bacillol Plus Bacillol 30 foam Bacillol 30 tissues Incidin liquid Meliseptol foam fresh Meliseptol foam pure

Disclaimer

Volg altijd de gebruiksaanwijzing van elk desinfectiemiddel. Langdurig gebruik kan aantasting van het materiaal niet uitsluiten. Novak M aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de desinfecterende werking van bovenstaande middelen.

Komenda, april 2023